

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đinđića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đinđića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

Број: 01-325  
Датум: 07.04.2016.године

## ПРОЦЕДУРА О ПАКОВАЊУ САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
1.8.	07.04.2016	
Процедуру израдио Сања Лукић, главна сестра Тим за стоматолошку здравствену заштиту		Процедуру оверио директор Доц.др Александар Митић
<i>Кесил 604</i>		



KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đinđića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đinđića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

Број: 01- 325  
Датум: 07.04.2016.године

На основу чл.23 ст.1 тач.1 Статута Клинике за стоматологију Ниш, Директор Клинике донео је дана 07.04.2016.године

## **ПРОЦЕДУРУ О ПАКОВАЊУ САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ**

Процедура дефинише начин на који се пакује санитетски материјал за стерилизацију на Клиници за стоматологију Ниш.

### **1. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ**

Процедура се примењује у свим Службама које се баве лечењем пацијената на Клиници за стоматологију Ниш.

### **2. ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМОВА**

**Стерилизација** је основни метод асепсе којим се постиже потпуно обесклицење предмета. То је профилактичка мера којом се спречава уносење инфекције у организам, предметима који долазе у контакт са крвљу или ткивима испод нивоа епидерма.

### **3. ОПИС ПОСТУПАКА И АКТИВНОСТИ**

Санитетски и завојни материјал се пакује и припрема за стерилизацију у свакој Служби. Начин на који се пакује завојни и санитетски материјал зависи од његове намене. Уколико ће се користити изван централног објекта Клинике за рад у издвојеним клиничким амбулантама у ПВЦ кесе или у добоше, у сваку ПВЦ кесу се ставља интегратор трака и затим завари. На рубу кесе се пише датум стерилизације и потпис особе која је извршила паковање. Спремљене кесе и добоши се у мега боксовима носе на стерилизацију.

Добоши се пакују у мега боксове и односе на стерилизацију.

### **4. ОДГОВОРНОСТ**

За спровођење ове Процедуре одговорне су стоматолошке сестре, медицинске сестре и зубни техничари запослени на Клиници за стоматологију Ниш.

За контролу спровођења Процедуре одговорна је Главна сестра, одговорне сестре Служби и шефови зубне технике на Клинике за стоматологију Ниш.

### **5. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ**

- Правилник заштите од болничких инфекција Клинике

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đinđića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đinđića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

- Програм заштите од болничких инфекција и стручнометодолошко упутство
- План рада Комисије за заштиту од болничких инфекција Клинике за стоматологију Ниш

## 6. ПРАВНА ПРИМЕНА И ЗНАЧАЈ ПРОЦЕДУРЕ

Процедура ступа на снагу даном доношења, а почиње да се примењује 8 (осам) дана од дана доношења.



ДИРЕКТОР,

Доц др Александар Митић