


KLINIKА ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đindića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đindića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

Број: 01-326
Датум: 07.04.2016.године

ПРОЦЕДУРА О СПРОВОЂЕЊУ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ ИНСТРУМЕНАТА, САНИТЕТСКОГ И ХИРУРШКОГ МАТЕРИЈАЛА

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
1.9.	07.04.2016	
Процедуру израдио Сања Лукић, главна сестра <i>Lučić</i>	Процедуру оверио директор Доц.др Александар Митић	
Тим за стоматолошку здравствену заштиту <i>Keckić Veselić</i>	 <i>Mitić</i>	

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

Број: 01- 326
Датум: 07.04.2016.године

На основу чл.23 ст.1 тач.1 Статута Клинике за стоматологију Ниш, Директор Клинике донео је дана 07.04.2016.године

ПРОЦЕДУРУ О СПРОВОЂЕЊУ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ ИНСТРУМЕНАТА, САНИТЕТСКОГ И ХИРУРШКОГ МАТЕРИЈАЛА

Процедура дефинише начине на који се спроводи стерилизација инструмената, завојног материјала и хируршког рубља на Клиници за стоматологију Ниш.

1. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у свим Службама Клинике за стоматологију Ниш које раде са пацијентима.

2. ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМОВА

Стерилизација је основни метод асепсе којим се постиже потпуно уништавање свих микроорганизама (патогених и непатогених). То је профилактичка мера којом се спречава уношење инфекције у организам.

3. ОПИС ПОСТУПАКА И АКТИВНОСТИ

Методe стерилизације које се спровode на Клиници за стоматологију Ниш су:

- стерилизација топлим сувим ваздухом
- стерилизација воденом паром под притиском.

СТЕРИЛИЗАЦИЈА ТОПЛИМ СУВИМ ВАЗДУХОМ

Спроводи се у посебним уређајима, сувим стерилизаторима. На овај начин се може стерилисати само термостабилан материјал (стакло, порцелан, метал).

Стерилизатор је опремљен термометром и термостатом. Инструменти се пакују у добоше или касете и стављају у стерилизатор. Време стерилизације, од момента достигнуте температуре, је: - 2 сата на 160° С

- 1 сат на 180° С.

СТЕРИЛИЗАЦИЈА ВОДЕНОМ ПАРОМ ПОД ПРИТИСКОМ

Спроводи се у посебним апаратима, аутоклавима. Најчешће је примењивана и веома поуздана метода стерилизације. Која ће температура и притисак у аутоклаву бити, као и временско трајање стерилисања зависи од врсте материјала који се стерилише. Најчешће се користи температуре од 120°С - 138° С под притиском од 1.5-2.5 атмосфере у трајању од 3-30 минута. Претходно припремљен материјал се пакује у посебне добоше или касете. Добоши имају двоструке станице, од којих је унутрашња фиксирана и има отворе, а спољашња је покретна. Добош се, у аутоклав, ставља отворених страница, да би водена пара под притиском могла да доспе до материјала у добошу.

Након завршене стерилизације затварају се отвори на добошу да не би дошло до контаминације материјала. Материјал стерилисан на овај начин стерилан је 72 час. Уколико се материјал не употреби, стерилизација се понавља.

ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ

Употребљени материјал и инструменти се одлажу у просторије само за то намењене. Ове просторије за прање су физички одвојене од просторије где се врши стерилизација. Сваки инструмент се

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

посебно пере као и сваки његов део. Посебно се обраћа пажња на зглобне делове, неравне површине и шупљине. Прање се врши најпре хладном водом а затим, топлом водом и меком четком и одређеним средством за дезинфекцију, како не би дошло до оштећења инструмената.

Опрани и дезинфиковани инструменти се ређају на компресу ради сушења и брисања. Овако припремљени инструменти пакују се у комплете или добоше. Сваки комплет се административно евидентира (датум стерилизације, контролна трака и потпис сестре која је вршила стерилизацију).

КОНТРОЛА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ

Исправност стерилизације се контролише свакодневно.

Под утицајем високе температуре папир мења боју што је знак успешне стерилизације. Папир се ставља на сваки добош. Уколико папирић није променио боју, материјал се не може користити и мора се стерилизатор технички преконтролисати.

Сви аутоклави и суви стерилизатори имају своје свеске где се уписује датум стерилизације, време укључивања, време искључивања, потпис лица које спроводи стерилизацију и лепи се контролни тест-папирић.

4. ОДГОВОРНОСТ

За спровођење ове Процедуре одговорне су стоматолошке сестре, медицинске сестре и зубни техничари на Клиници за стоматологију Ниш.

За контролу спровођења Процедуре одговорна је Главна сестра Клинике, одговорне сестре Служби и шефови зубне технике.

5. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

- Програм заштите од болничких инфекција и стручнометодолошко упутство
- Упутство за руковање и одржавање стерилизатора
- Књига стерилизације.

6. ПРАВНА ПРИМЕНА И ЗНАЧАЈ ПРОЦЕДУРЕ

Процедура ступа на снагу даном доношења, а почиње да се примењује 8 (осам) дана од дана доношења.



ДИРЕКТОР,

Доц др Александар Митић