

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

Број: 01-352
Датум: 07.04.2016.године

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЦЕНУ СТАЊА ОПРЕМЕ

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
6.3.	07.04.2016	
Процедуру израдио Зоран Пауновић <i>[Signature]</i> Златко Вељковић <i>[Signature]</i>		Процедуру оверио директор Доц.др Александар Митић
Тим за стоматолошку здравствену заштиту <i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>



KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

Број: 01- 352
Датум: 07.04.2016.године

На основу чл.23 ст.1 тач.1 Статута Клинике за стоматологију Ниш, Директор Клинике донео је дана 07.04.2016.године

ПРОЦЕДУРУ ЗА ПРОЦЕНУ СТАЊА ОПРЕМЕ

Процена стања стоматолошке и друге опреме врши се периодично, у циљу унапређења квалитета рада, безбедности пацијената и запослених. Сваки апарат поседује сервисну књижицу у коју се уписују предузете интервенције. Сервисне књижице садрже назив апарата, серијски број, годину производње, место за упис предузете интервенције као и датум сервисирања.

Редован сервис се, у зависности од апарата, врши на тромесечном, шестомесечном или годишњем нивоу.

Апарат за воду има редован сервис на тромесечном или четворомесечном нивоу. Постоји мерач проточности воде, уколико су вредности до 3mikros/cm вода је одговарајућег квалитета; у супротном је потребно контактирати сервисера.

Одржавање стерилизације стакленог прибора врши се у стерилизатору, према наведеном поступку уз означавање датума, времена трајања поступка и особе која је извршила стерилизацију.

Поступак за сервисирање опреме:

1. Проценити грешку на основу приложених упутстава за апарат, поред одређених грешака, наведено је да се могу уклонити само уз помоћ сервисера;
2. Упутити захтев и обавештење Директору, о неопходности сервиса;
3. Позвати сервисера по добијеном одобрењу Директора.



ДИРЕКТОР,

Доц др Александар Митић